

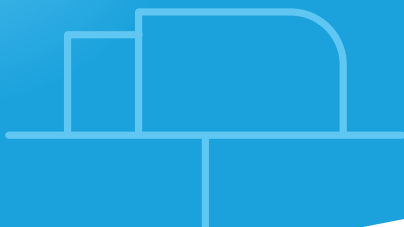
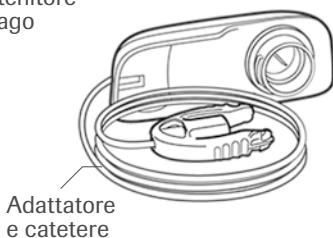


2 SET DI INFUSIONE ACCU-CHEK INSIGHT FLEX

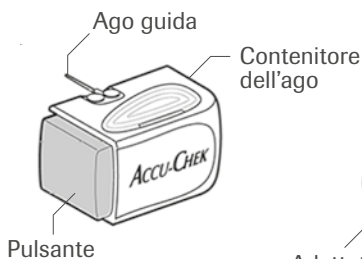

2.1 AGOCANNULA E CATETERE

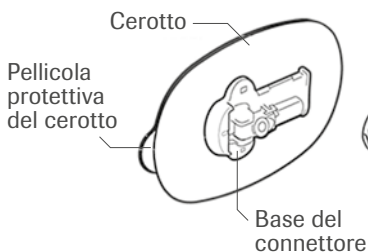


2.2 LUNGHEZZA DEL CATETERE E CANNULA

Prima di collegare il set d'infusione per la prima volta, regolare la quantità di riempimento per il catetere e l'agocannula sul microinfusore per insulina attenendosi alle quantità di riempimento mostrate di seguito (insulina U100). Dal menu del microinfusore, andare a [Impostazioni](#) > [Impostazioni della terapia](#) > [Impostazioni del set d'infusione](#).

Lunghezza catetere	Unità (circa)	Volume (circa)
40 cm	9 U	90 μ L
70 cm	13 U	130 μ L
100 cm	17 U	170 μ L
Lunghezza cannula		
6/8/10 mm	0,7 U	7 μ L

2.3 SITI DI INFUSIONE CONSIGLIATI

① **Nota:** scegliere un sito d'infusione lontano dalla vita, da ossa e tessuto cicatriziale, dall'ombelico e da altri siti d'infusione usati di recente. Si consiglia di ruotare nella scelta del sito d'infusione.

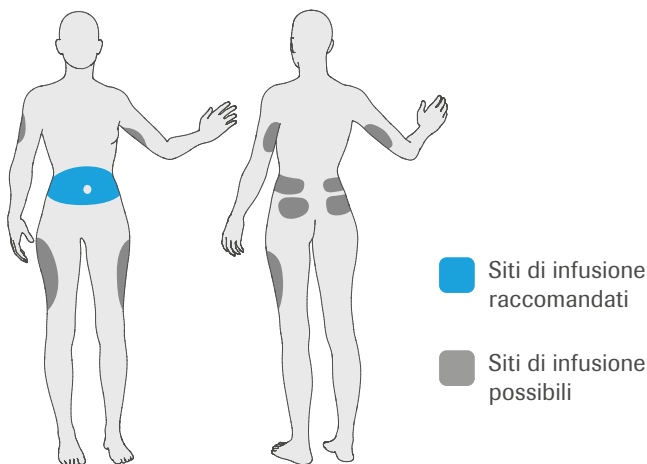


2.4 APPLICAZIONE AUTOMATICA DEL SET DI INFUSIONE CON IL DISPOSITIVO ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS




Se il tensionatore del dispositivo d'inserimento è spostato in alto, abbassarlo per riportarlo nella posizione iniziale.



Inserire l'agocannula nel dispositivo d'inserimento. Il pulsante blu dell'agocannula deve essere rivolto verso il blocco di sicurezza blu del dispositivo d'inserimento. L'agocannula è inserita correttamente quando scatta in sede producendo un clic.

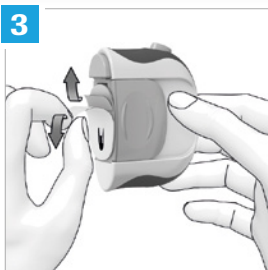

Rimuovere la pellicola protettiva bianca e poi la pellicola protettiva blu. Il simbolo  sulla pellicola protettiva del cerotto (A) indica il lato al quale sarà poi collegato il catetere.




4 Tenere il dispositivo d'inserimento con il lato blu del tensionatore verso l'alto.

Tenere il tensionatore con le dita su entrambi i lati e tirarlo verso l'alto fino a quando non produce un clic.




5 Posizionare il dispositivo d'inserimento sul sito d'infusione scelto e premerlo saldamente sulla pelle. L'utente deve poter raggiungere facilmente il lato dell'agocannula dove in seguito sarà collegato il catetere.

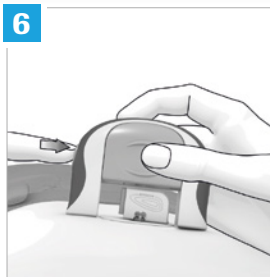

6 Premere il pulsante di rilascio per inserire la cannula dell'agocannula nella pelle. Se non si riesce a premere il pulsante di rilascio (il blocco di sicurezza non è completamente scomparso) premere il dispositivo d'inserimento più saldamente contro la pelle e riprovare.



7 Rimuovere il dispositivo d'inserimento. Fare riferimento a «Applicazione manuale del set di infusione» e continuare dal punto 5.

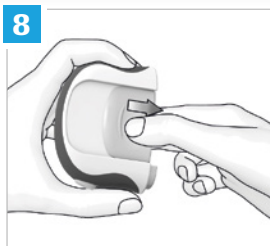


8 Per conservare il dispositivo d'inserimento, abbassare il tensionatore per riportarlo nella posizione iniziale.

2.5 APPLICAZIONE MANUALE DEL SET DI INFUSIONE




1 Lavare le mani ed estrarre il set d'infusione dalla confezione. Scegliere e disinfettare il sito d'infusione secondo le istruzioni del medico curante o del team diabetologico.

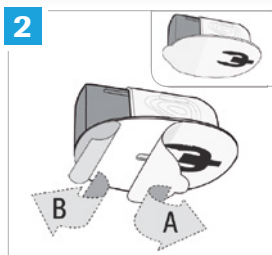


2 Rimuovere la pellicola protettiva bianca (A) e la pellicola protettiva blu (B).



3 Premere il pulsante fino a quando non si blocca. Fuoriuscirà l'ago guida con la cannula morbida.

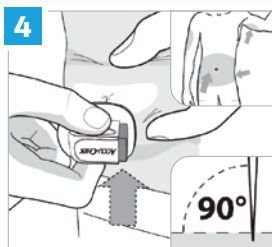


4 Inserire il set d'infusione a un angolo di 90°.

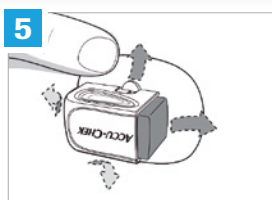

5 Premere saldamente il cerotto adesivo sul sito d'infusione, facendo in modo che aderisca bene alla pelle.




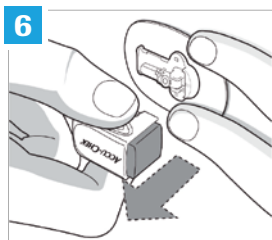


6 Staccare dal corpo il contenitore dell'ago con l'ago guida con un movimento perpendicolare, lasciando in posizione il cerotto adesivo e la base del connettore.



7 Collegare il catetere al microinfusore per insulina e riempirlo seguendo le istruzioni fornite con il microinfusore per insulina. Accertarsi che sia stato riempito completamente e che non ci siano bolle d'aria.

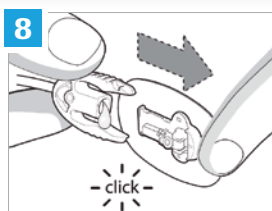

8 Collegare il catetere riempito alla base del connettore. Prima di riprendere la terapia insulinica con microinfusore, eseguire il riempimento cannula.

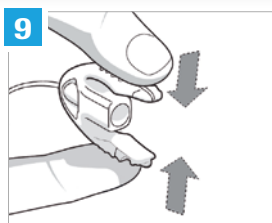

9 Per staccare il catetere, premere contemporaneamente le clip laterali del connettore e rimuoverlo. Tenere pulita la base del connettore. Applicare il cappuccio se necessario.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE D'USO

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT sono marchi di Roche. Diabeloop, DBLG1 e YourLoops sono marchi registrati di Diabeloop in Europa. Dexcom e Dexcom G6, sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

© 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.it
Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
Viale G.B. Stucchi 110
20900 Monza (MB)

