

10 SISTEMA DI ALLARMI E STORICO



10.1 SISTEMA DI ALLARMI

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARMI

Nome Diabeloop	Conformità con la norma EN 60601-1-8
Allarmi	› Allarmi di priorità elevata
Avvisi	› Allarmi di priorità bassa
Notifiche	› N/D

SIMBOLI ASSOCIATI AL SISTEMA DI ALLARMI

Simbolo Definizione in base alla norma EN 60601-1-8



Questo simbolo viene utilizzato per indicare che è stato riconosciuto un allarme e/o un avviso per una durata indeterminata (nessun promemoria). L'icona scompare solo dopo che l'azione è stata completata.




Simbolo

Definizione in base alla norma EN 60601-1-8



Questo simbolo viene utilizzato per indicare che è stato riconosciuto un allarme e/o un avviso per un determinato intervallo di tempo. Questo intervallo è indicato nella colonna denominata “Durata del riconoscimento degli allarmi/avvisi”.

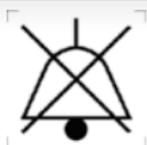

Questo simbolo viene utilizzato per indicare che il suono di un avviso e/o di una notifica è stato disattivato.

CONFIGURAZIONE DI AVVISI E NOTIFICHE

Per configurare gli avvisi e le notifiche del sensore, passare a [Impostazioni](#) > [Avvisi](#) > [Sensore glucosio](#).



Toccare [Tutti gli avvisi](#) (oppure [Tutte le notifiche](#)).



Selezionare [Modalità vibrazione](#) se si desidera utilizzare questa modalità. Selezionare [Volume ore diurne](#) premendo il numero corrispondente. Selezionare [Volume ore notturne](#) premendo il numero corrispondente. Salvare la nuova configurazione toccando [Salva](#).

⚠ Avvertenza: si consiglia di non disattivare o abbassare il suono di avvisi e/o notifiche al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema.

ⓘ Nota: gli allarmi non possono essere configurati o silenziati poiché richiedono un'azione imminente.

ESEMPI DI AVVISI

Codice di errore

Descrizione

70101

Microinfusore

La batteria del microinfusore è quasi scarica.

70104

Microinfusore

Il sistema ha perso la connessione con il microinfusore per oltre 30 minuti.

10112

Sensore glucosio

La glicemia è in calo.

IMPORTANTE: questo avviso viene attivato solo in modalità loop.

20100

Modalità Loop

Il sistema non ha ricevuto alcuna lettura G6 per 15 minuti.

IMPORTANTE: questo avviso viene attivato solo in modalità loop.

20101

Modalità Loop

Il sistema consiglia un bolo pasto.

60100

DBLG1

La batteria del DBLG1 è scarica (15%).




Azione da eseguire	Promemoria test
Assicurarsi di avere pronta una batteria nuova.	N/D
Connettere nuovamente il microinfusore dal menu Stato del Sistema .	Ogni 30 minuti
<ol style="list-style-type: none">1. Utilizzare il misuratore di glicemia per prendere decisioni sul trattamento del diabete.2. Assumere i carboidrati di emergenza e dichiararne le quantità sul DBLG1.3. Se necessario, consultare il proprio medico curante.	Ogni 30 minuti
<ol style="list-style-type: none">1. Utilizzare il misuratore di glicemia per prendere decisioni sul trattamento del diabete.2. Avvicinare il DBLG1 e il sensore.3. Controllare lo stato del sensore.4. Rivolgersi al personale sanitario per richiedere assistenza.	N/D
<ol style="list-style-type: none">1. Sbloccare il DBLG1.2. Modificare la quantità in base alla necessità.	Ogni 5 minuti se il bolo non viene inviato
Caricare il DBLG1 quanto prima.	Ogni 15 minuti

10.2 STORICO

GRAFICO DELLO STORICO

⚠ Avvertenza: in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica al DBLG1, la memoria non verrà recuperata. Pertanto, al riavvio del DBLG1 è consigliabile segnalare i dati mancanti relativi alla glicemia e all'erogazione di insulina e i dati relativi alle azioni eseguite durante l'interruzione.


Per visualizzare il grafico, toccare  > [Storico](#) o il grafico riepilogativo sulla schermata iniziale.

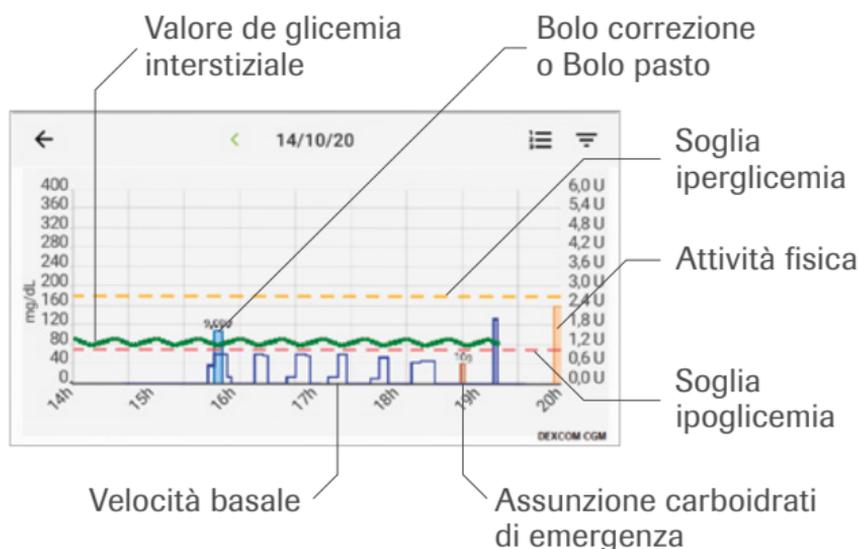

Per filtrare le informazioni visualizzate sul grafico, toccare l'icona  situata nell'angolo in alto a destra del grafico cronologia.

CRONOLOGIA DETTAGLIATA DELLE DOSI DEI BOLI

Per visualizzare la cronologia dettagliata delle dosi dei boli, toccare l'icona  > [Bolo](#).

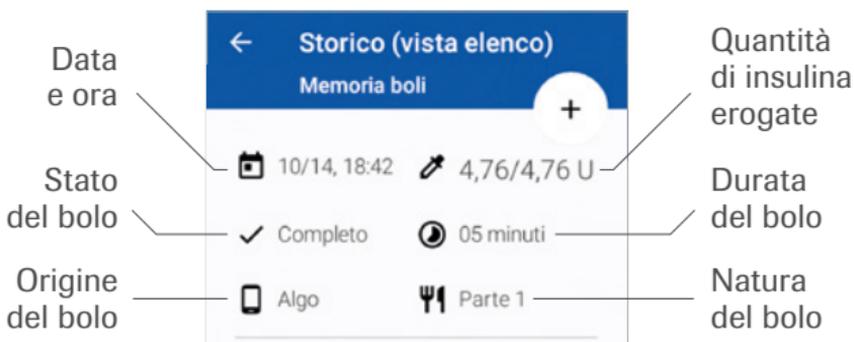

Per visualizzare un bolo esterno sul DBLG1, accedere a [Storico](#) >  > [Bolo](#).

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE IL MANUALE D'USO**

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT sono marchi di Roche. Diabeloop, DBLG1 e YourLoops sono marchi registrati di Diabeloop in Europa. Dexcom e Dexcom G6, sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

© 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-check.it
Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
Viale G.B. Stucchi 110
20900 Monza (MB)

